

# スイッチ接続キット 接続手順


## 【有線接続の場合】

- ・①と②とを接続します。  
\* USB-Cの場合は①の代わりに④で接続するのも手軽です。
- ・②にスイッチを接続します。(ジャック1 またはジャック2)
- ・iPadに接続します。

iPadを充電しながらスイッチ接続ができます。

有線接続では、③⑤⑥は使用しません。

①と②とを接続した後、⑦のモビロンバンド等を使い固定すると、抜けにくくなります。(サンプルをお試しください)

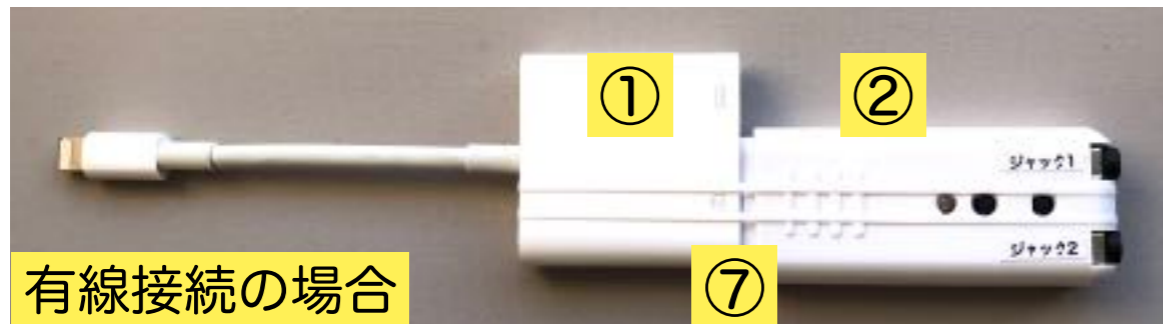


## 【無線接続の場合】

- ・② - ③ - ⑤ - ⑥ の接続をします。
- ・⑥をコンセントに挿します。
- ・②にスイッチを接続します。
- ・③とiPadをBluetoothで接続します。


無線接続では、①④は使用しません。

USB2BT Plusの電源口は、磁石タイプのため平行に抜かず、斜め方向に折るようにはせずと部品が離れなくて良いです。

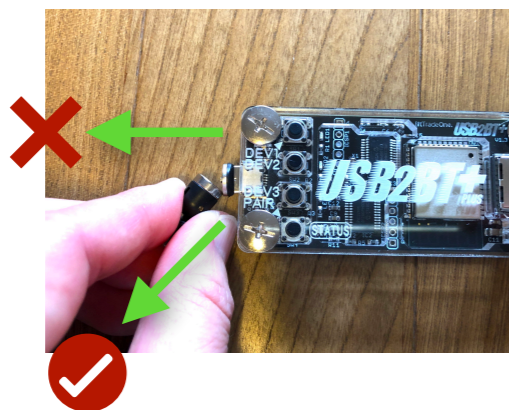

## USB2BT Plusのペアリング手順

- 1) USB2BT Plus に 変わる君 を接続します。
- 2) USB2BT Plus の電源を接続します。
- 3) USB2BT Plus 本体の機器を接続するボタン (3つのうちのいずれか) を押します。ステータスLEDは赤で点滅します。
- 4) ペアリングボタンを長押しします。ステータスボタンは青で点滅します。
- 5) 接続する機器のBluetoothの設定画面を開きます。iPadの場合、設定 アプリ > Bluetooth
- 6) デバイス一覧に USB2BT:22xxxxxx が表示されたら選択します。
- 7) 接続済み になれば接続完了です。

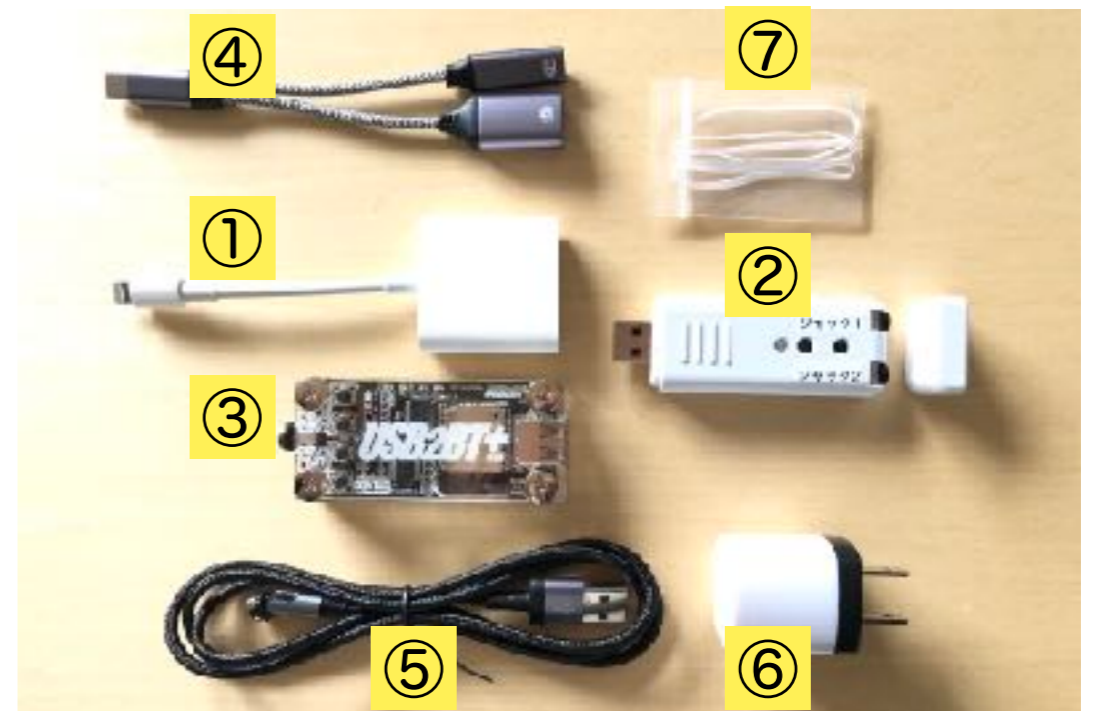

## 【同梱物】

- ① lightning - USB または USB-C - USB 変換アダプタ
- ② iOS設定済み変わる君
- ③ USB2BT Plus (電源口には磁石式の変換部品がついています)
- ④ USB-C変換アダプタ (USB-Cタイプにのみ付属)
- ⑤ 電源ケーブル (磁石式)
- ⑥ 電源アダプタ
- ⑦ モビロンバンド (サンプル)



⑥を使用せず、お持ちのモバイルバッテリーに接続して使用すれば、外出時に便利です。

## USB2BT PlusのステータスLEDについて

LEDの状態	機器の状態
消灯	未接続
紫	接続中
青	接続済
赤点滅	入力デバイス交換 (再ペアリングしてください)
青点滅	ペアリング中
赤青交互に点滅	USB電源またはUSB2BT Plusハードウェアエラー